

PROTOCOLO DE USO DEL SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE HEMORROIDES

Es un producto Médico-Quirúrgico Clase III, según la "Directiva UE", puede ser utilizado dentro y fuera del organismo. Compuesto de una estructura de polímero n-BCA (Cianocrilato modificado).

En contacto con la sangre polimeriza formando una membrana fina y flexible produciendo embolización.

El inicio de la polimerización esta entre 1-2 s, y termina sobre los 5 s.

La membrana formada es eliminada del cuerpo a través de un proceso hidrolítico. Oscila entre tres y cuatro meses su desaparición total.

Se aconseja en hemorroides grado dos y tres, con favorables resultados.

Extraer 1ml de Hemoff en una jeringa de 10ml.

Añadir 2ml de Dextrosa al 5%, intentado agitar la jeringa para realizar una mezcla lo más homogénea posible.

Pasar la mezcla a tres jeringas de 1ml cada una.

Ponemos a cada jeringa una aguja distinta purgada previamente con Dextrosa al 5%.

Introducimos la aguja en la zona proximal y realizamos una inyección rápida y continua retirando la aguja y presionamos la hemorroide tratada durante más de un minuto.

Siempre hay que tener la precaución de no aplicar el Cianocrilato en el exterior de la hemorroide.

Observamos que la hemorroide se ha reducido inmediatamente.

Repetir la acción en los otros paquetes hemorroidales.

Recordar: Inyección rápida y continua, y aplicar presión posterior durante más de un minuto

(La jeringa más utilizada, es aguja y jeringa de insulina).